



GUIA DE

# LIMPEZA & DESINFECÇÃO

DO SEU EQUIPAMENTO\*

\*Válido para todos os equipamentos DMC.



Elaborado pelo

  
**Nupen**  
INSTITUTO

# Limpeza do equipamento

Os equipamentos deverão ser limpos com um pano macio umedecido em uma solução de água morna e detergente neutro.



# Limpeza dos óculos de proteção\*

Os óculos de proteção podem ser lavados com água morna e detergente neutro.




\*válido para todos os óculos que acompanham os equipamentos da DMC.

# Desinfecção

A desinfecção desses itens deve ser realizada com um pano macio umedecido com:

Álcool 70° GL ou desinfetante (princípio ativo Ortofenilfenol 0,1%).

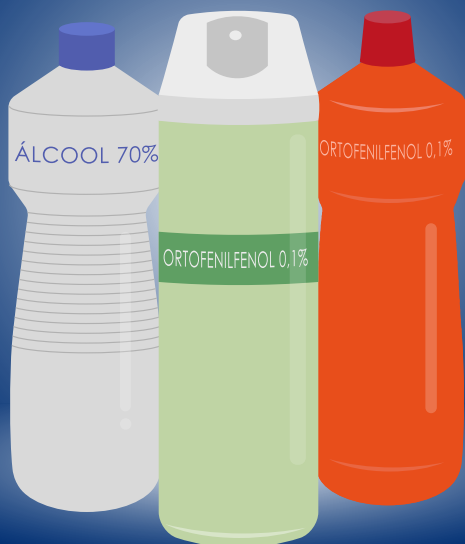


NÃO BORRIFAR ÁLCOOL  
NO VISOR DO EQUIPAMENTO



# Barreira mecânica

Como você minimiza a contaminação do equipamento?  
Com PLÁSTICO FILME:

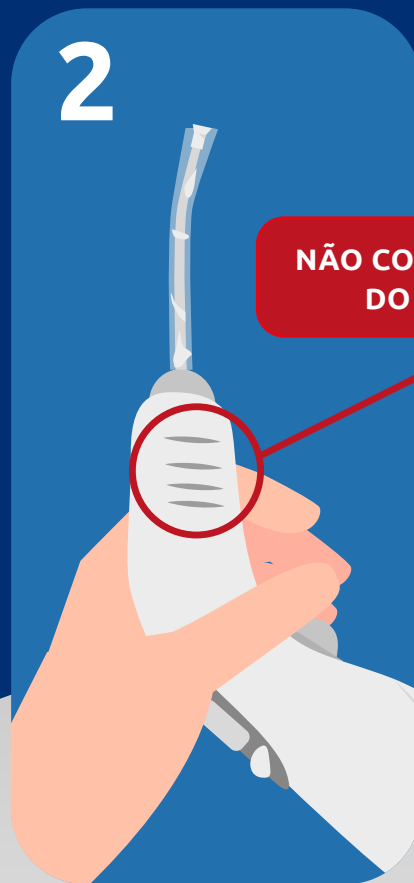

**NÃO COBRIR A VENTILAÇÃO  
DO EQUIPAMENTO!**

**OU...**

# Barreira mecânica

Como você minimiza a contaminação do equipamento?  
Com SAQUINHO PLÁSTICO.



# Espaçador


O ESPAÇADOR é de uso individual.  
Novos espaçadores podem ser  
adquiridos no seu distribuidor DMC\*.

O ideal é que cada paciente tenha o seu  
espaçador.

**O ESPAÇADOR NÃO PODE  
SER ESTERILIZADO.**

Antes de usá-lo recomenda-se que ele seja  
desinfetado com álcool 70° GL ou desinfetante  
(princípio ativo Ortófenilfenol 0,1 %), e após sua  
utilização seja descartado.

Encontre seu distribuidor DMC:  
[dmcgroup.com.br/ondecomprar](http://dmcgroup.com.br/ondecomprar)

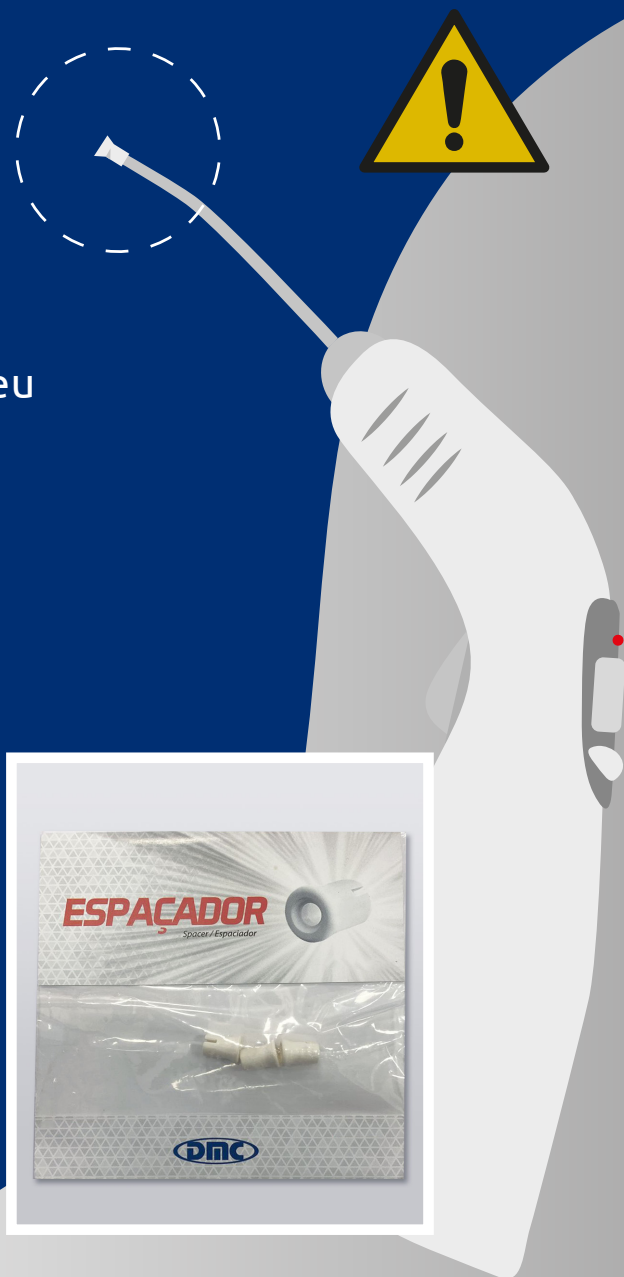

# Pulseira



A PULSEIRA é de uso individual.  
Novas pulseiras podem ser  
adquiridas no seu distribuidor DMC\*.  
O ideal é que cada paciente tenha  
a sua pulseira.

**A PULSEIRA NÃO PODE  
SER ESTERILIZADA.**

Antes de usá-la, recomenda-se que ela seja  
desinfetada com álcool 70° GL ou desinfetante  
(princípio ativo Ortófenilfenol 0,1 %), e após sua  
utilização seja descartada.

Pode-se ainda cobri-la com plástico filme.

Encontre seu distribuidor DMC:  
[dmcgroup.com.br/ondecomprar](http://dmcgroup.com.br/ondecomprar)

